

CINTO "111 F" FRANGIATO CON PELOTTE
- DESTRO / SINISTRO / DOPPIO -
(cod. 046 / 047 / 048)**Nome Prodotto**

CINTO "111 F" FRANGIATO CON PELOTTE
DESTRO / SINISTRO / DOPPIO
(cod. 046 / 047 / 048)

REF	Misure Fianchi (cm)
046	da 80 a 120 (scatto ogni 5)
047	
048	

Colore disponibile: Ecrù.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo indicato per pazienti con ernia inguinale riducibile. La contenzione dell'ernia è data dalla pelotta inguinale. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Cinto: 76% Cotone, 14% Gomma e 10% Viscosa.

Pelotte (Codice Catalogo 082):

100% Poliuretano rivestite da 86% Poliestere e 14% Elastan, con piastra in velcro in Polipropilene.

Istruzioni per l'Uso

Prima di indossare si consiglia una accurata pulizia della cute nella zona di applicazione. Indossare sopra a biancheria intima.

1. Regolare la circonferenza della cintura e del sotto coscia tramite la fibbia ed i ganci metallici.
2. Posizionare la pelotta nella parte interessata riducendo l'ernia nella propria sede restando in posizione distesa.

Controindicazioni e Avvertenze

Se segnalate dal medico curante ernie non riducibili, affezioni cutanee.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**CINTO "111 F" FRANGIATO CON PELOTTE
- DESTRO / SINISTRO / DOPPIO -
(cod. 046 / 047 / 048)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per le Pelotte:

Lavare a mano in acqua fredda con detersivo neutro, sciacquare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Per il Cinto:

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica e scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Cinto & Pelotte → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y060406

Codice EMDN: Y060406

Codice BD/RDM (046): 2528950

Codice BD/RDM (047): 2528951

Codice BD/RDM (048): 2528952



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902