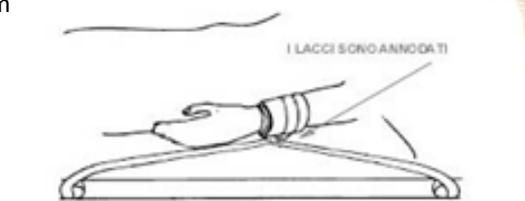


**FERMA POLSO PER LUNGODEGENTI IN VELLO
DI LANA MERINOS
(cod. 200)****Nome Prodotto**FERMA POLSO PER LUNGODEGENTI IN VELLO DI
LANA MERINOS (cod. 200)

REF	Taglia
200	Unica

Colore: Beige

Lunghezza lacci: 140 cm

**Destinazione d'Uso**

Indicato per immobilizzare il polso del paziente per prevenire ad esempio che possa sfilarsi da solo l'ago per la flebo. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Lana Merinos

Tirante (gallone): 100% Cotone



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Indossare il polsino e fissarlo facendo passare il tirante inferiore intorno al polso, quindi dentro all'anello di metallo, tornare quindi indietro e annodare i due tiranti attorno al polso.

Assicurare i lacci alla struttura del letto.

Per un maggiore "controllo" è possibile assicurare i lacci a due punti diversi della struttura (vedi figura).

Può essere posto direttamente a contatto della pelle.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida, a 30°C con detersivo per capi delicati, anche in lavatrice con il programma lana, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Tenere il fermapolso ben disteso per evitare il formarsi di pieghe. Ripassare leggermente con spazzola morbida una volta asciutto. Sono possibili numerosi lavaggi.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**FERMA POLSO PER LUNGODEGENTI IN VELLO
DI LANA MERINOS
(cod. 200)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Fermapolso → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0804

Codice EMDN: V0804

Codice BD/RDM: 2523132



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902