

**CUSCINO CAMELLA DI POSIZIONAMENTO  
"AIRMOVE"  
(cod. 235)****'Nome Prodotto**

CUSCINO CAMELLA DI POSIZIONAMENTO  
"AIRMOVE"  
(cod. 235)

<b>REF</b>	Colore
235	Verde Chiaro
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 38	
Larghezza cm. 26	
Altezza cm. 11	



Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il cuscino è indicato per sostenere la nuca per sedute di massaggi oltre che per diminuire la pressione degli arti durante la movimentazione dei lungodegenti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura: 100% PVC schiumato in cilindri.

Fodera Interna: 100% Tessuto Evolon® (PES / PA).

Fodera Esterna: 53% Poliestere e 47% Poliuretano. Chiusura a zip.

**Istruzioni per l'Uso**

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Non usare come cuscino antidecubito per piaghe superiori al Primo Livello.

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera esterna.

Lavare in acqua calda massimo a 90°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, centrifugare delicatamente, ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 90°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**CUSCINO CAMELLA DI POSIZIONAMENTO  
"AIRMOVE"  
(cod. 235)****Tipo di Confezione**

Confezionato in busta in TNT.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V080301

Codice EMDN: V080301

Codice BD/RDM: 2553685



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902