

**CUSCINO GEL PUNTINATO IN MEMORY FOAM E
SMARTGEL® MASSAGGIANTE
(cod. 301)****'Nome Prodotto**

CUSCINO GEL PUNTINATO IN MEMORY FOAM
E SMARTGEL MASSAGGIANTE
(cod. 301)

REF	Colore
301	Grigio Antracite
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 45, Larghezza cm. 45 Altezza cm. 5	



Confezione da 1 pezzo.

Destinazione d'Uso

Il cuscino è indicato per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella. Previene piaghe da decubito nell'area delle ossa ischiatiche. La sagomatura, l'elevata densità unita alla bassa resilienza, offrono un supporto ottimale alla zona lombare, assicurando, allo stesso tempo, un buon sostegno laterale diminuendo le tensioni muscolari. Il layer superiore in Smartgel® garantisce maggiore comfort potenziando l'effetto del viscoelastico e migliorando la distribuzione della pressione esercitata da chi lo utilizza. Il disegno a punti tratteggiati regala una sensazione delicata di massaggio per la schiena e per le gambe e favorisce la circolazione dell'aria nell'area ischiatica.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Fodera: 100% poliestere tinto con trattamento SILVERPLUS® antisettico e HYDROCOOL® per il controllo dell'umidità. Antiscivolo: 91% PVC e 9% Poliestere; rivestimento interno al 100% poliestere. Chiusura a zip.

Il trattamento Hydrocool® garantisce una evaporazione costante:

- lo scambio di calore tra seduta e ambiente risulta efficace
- a contatto con il tessuto la pelle rimane fresca

Il trattamento Silverplus® agli ioni d'argento garantisce:

- un ottimo livello antisettico
- un elevato standard di comfort

I marchi SilverPlus® e HydroCool®, appartengono ai rispettivi proprietari.

Lastra: composta da Smartgel® immerso in materiale viscoelastico Memory Foam.

Istruzioni per l'Uso

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.

Le sacche di gel rivolte verso le cosce, in questo modo la pressione viene distribuita prevenendo la formazione di piaghe. La parte antiscivolo deve essere rivolta verso il basso a contatto con la seduta.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**CUSCINO GEL PUNTINATO IN MEMORY FOAM E
SMARTGEL® MASSAGGIANTE
(cod. 301)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera. Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.
Per la lastra lavare passando un panno morbido imbevuto di acqua e, se il caso, disinfettare con soluzione di Amuchina o di prodotti simili. Non mettere in lavatrice o in ammollo. Non usare solventi.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo. Conservare il cuscino in posizione orizzontale.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica / Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta / Scatola di Cartone → Raccolta Carta / Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2518786

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902