


**CORSETTO ARTROUNIVERSAL "C"
CONTENTIVO LOMBARE LEGGERO
(cod. 304C)****Nome Prodotto**

CORSETTO ARTROUNIVERSAL "C"
CONTENTIVO LOMBARE LEGGERO
(cod. 304C)

REF	Taglie	Misure Circonferenza Vita (cm)
304C	S	70
	M	80
	L	90
	XL	100
	XXL	110
	3XL	120

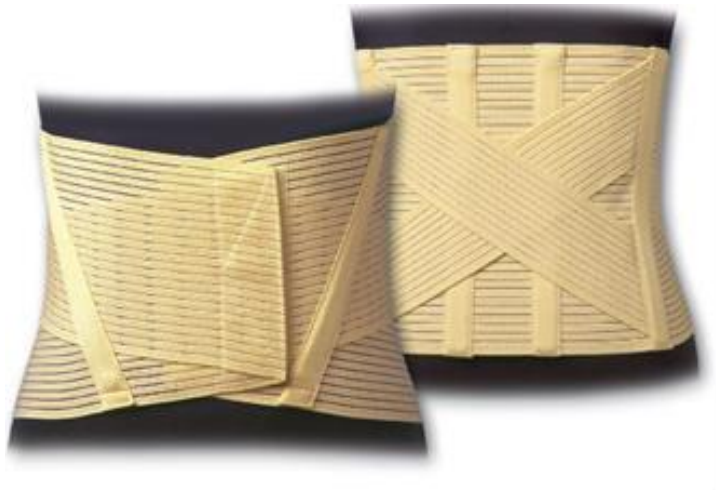

Altezza anteriore: 19 cm

Altezza posteriore: 28 cm

Colore: Crema

Destinazione d'Uso

Per pazienti affetti da sintomatologie artrosiche del rachide lombare e nel decorso postoperatorio delle diverse patologie del rachide. Indicata anche nella prevenzione e terapia di strappi muscolari e mialgie.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

48% Cotone, 41% Poliestere, e 11% Gomma. Contiene Lattice.

Chiusura a strappo regolabile con velcro.

Istruzioni per l'Uso

Indossare in vita sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale e regolare con la chiusura a velcro.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**CORSETTO ARTROUNIVERSAL "C"
CONTENITIVO LOMBARLE LEGGERO
(cod. 304C)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Pancera → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y060308

Codice EMDN: Y060308

Codice BD/RDM: 2522050



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902