

**SACCHETTO "SALVAGESSO" PER GAMBALETTO
(cod. 337)****Nome Prodotto**

SACCHETTO "SALVAGESSO" PER
GAMBALETTO
(cod. 337)

REF	Misure (cm)	Colore
337	~ 45 x 80	Trasparente

Confezione da 6 pezzi

**Destinazione d'Uso**

Indicato per evitare di bagnare l'arto ingessato o bendato durante la doccia o il bagno.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Involucro esterno:
polietilene bassa densità
riciclato 60%

Sacchetto:
polietilene bassa densità riciclato 60%

Supporto e Adesivo:
carta con film trasparente in polietilene e
adesivo permanente a base acrilica

Istruzioni per l'Uso

Indossare sopra l'arto gessato o bendato e prima di sigillare con la fascia adesiva togliere l'aria al suo interno.
Seguire le istruzioni riportate sul singolo sacchetto.

Controindicazioni e Avvertenze

Posizionare il sacchetto su parti asciutte.

Il sacchetto non è adatto per immersioni in acqua e comunque è da usare per brevi lavaggi.

Fare attenzione, il sacchetto non è antiscivolo.

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

Nessuna.



Il sacchetto è utilizzabile solo una volta.

Conservazione

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, ecc.) determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il sacchetto se risulta danneggiato.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

**SACCHETTO "SALVAGESSO" PER GAMBALETTA
(cod. 337)****Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Sacchetti → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0399

Codice EMDN: T0399

Codice BD/RDM: 2539852



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni,9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051/373838 Fax: +39 051/371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877