

**SEDUTA SAGOMATA EQUILIBRATRICE IN
POLIURETANO / PER BAMBINO
(cod. 359B)****Nome Prodotto**

SEDUTA SAGOMATA EQUILIBRATRICE IN
POLIURETANO / PER BAMBINO
(cod. 359B)

REF	Colore
359B	Avorio
Misure ($\pm 3\%$)	
Lunghezza cm. 35	
Larghezza cm. 40	
Altezza cm. 6	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato nelle carrozzelle ortopediche per consentire una maggiore stabilità nella conduzione del mezzo ed un maggior conforto del paziente.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Poliuretano espanso stampato a freddo.

Istruzioni per l'Uso

Utilizzare il dispositivo posizionandolo sul sedile della carrozzina con il cuneo centrale in avanti e la parte concava verso lo schienale. Si consiglia di non porla a diretto contatto con la pelle ricoprendo la seduta con una fodera di cotone o tessuto naturale.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua fredda con detersivo neutro, sciacquare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

La seduta sagomata col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in busta di TNT.

**SEDUTA SAGOMATA EQUILIBRATRICE IN
POLIURETANO / PER BAMBINO
(cod. 359B)****Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Seduta → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080302

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2268080



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902