

Nome ProdottoCUSCINO ANTIDECUBITO
CAMERA ARIA / ACQUA
(cod. 366)

REF	Colore
366	Azzurro
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 40	
Larghezza cm. 42	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito per carrozzine e comode.

Può essere riempito con aria o acqua.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% PVC LIGHT BLUETECH (idrorepellente)

Spessore 0,3 mm,

Valvole in PVC (trasparente per aria e nera per acqua). Saldature ad alta frequenza.

Istruzioni per l'Uso**SOLUZIONE 1: RIEMPIMENTO AD ARIA (valvola trasparente)**

Gonfiare il cuscino soffiando aria, tenendo premuto con due dita l'imboccatura della valvola trasparente permettendo così l'ingresso di aria all'interno del cuscino senza renderlo rigido.

Non utilizzare aria compressa.

SOLUZIONE 2: RIEMPIMENTO AD ACQUA (valvola nera)

Per peso corporeo fino a 70 kg riempire il cuscino con litri 4,5 di acqua.

Per peso corporeo superiore ai 70 kg fino ad un massimo di 90 kg riempire il cuscino con litri 4 di acqua.

Posizionarlo su carrozzella o comoda.

In entrambi i casi si consiglia di non porla a diretto contatto con la pelle ricoprendo la seduta con una fodera di cotone o tessuto naturale.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Se il caso passare con una soluzione di Amuchina o prodotto simile.

Non usare solventi.

Lavare con un panno umido ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Camera d'Aria → Raccolta Plastica

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2528981



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902