

BUSTO "ROMA" 2 STECCHE SFODERATO
H.28/35 CM
(cod. 600)**Nome Prodotto**

BUSTO "ROMA" 2 STECCHE SFODERATO
H.28/35 CM
(cod. 600)

REF	Misure Circonferenza Vita (cm)
600	da 60 a 120 (scatto ogni 5)



Altezza Anteriore: ~ 28 cm.

Altezza Posteriore: ~ 35 cm.

Colore: crema

Destinazione d'Uso

Dispositivo medico utilizzato per l'immobilizzazione del tratto lombare. Particolarmente consigliato per persone con ridotta manualità indicato nelle patologie maggiori del rachide dorso lombare e lombo sacrale, discopatie, lombosciatalgie in fase acuta. Riducendo la mobilità del rachide è indicato anche in situazioni post-traumatiche e postoperatorie.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

89% Cotone e 11% Viscosa.

Chiusura con galloni e fibbie passanti, con velcro. Fibbie e stecche in ferro.

Istruzioni per l'Uso

Indossare sopra un capo di biancheria intima, possibilmente di fibra naturale, regolandone la tensione con le chiusure con i tiranti poste sul davanti. Gli inserti in elastico consentono una migliore vestibilità.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

BUSTO "ROMA" 2 STECCHE SFODERATO
H.28/35 CM
(cod. 600)**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Busto → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y060308

Codice EMDN: Y060308

Codice BD/RDM: 2523361



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902