

LAVATESTA DOPPIA ALTEZZA CON SCARICO
(cod. 629)**Nome Prodotto**LAVATESTA DOPPIA ALTEZZA CON
SCARICO
(cod. 629)

REF	Colore
629	Azzurro
Misure ($\pm 3\%$)	
Diametro cm. 60	
Altezza cm. 20	
Lunghezza tubo di scarico cm. 60	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per lavare e risciacquare i capelli per le persone allettate. Con tubo di scarico.

Il doppio bordo garantisce una maggiore praticità evitando di bagnare il letto.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% PVC LIGHT BLUETECH (idrorepellente)

Spessore 0,3 mm,

Valvole in PVC. Saldature ad alta frequenza.

Istruzioni per l'Uso

Appoggiare la testa della persona sul lavatesta nell'apposita fessura: l'acqua versata grazie ai bordi gonfiabili non bagna il letto.

L'acqua versata grazie ai bordi gonfiabili può essere raccolta in un catino o direttamente in lavabo.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Se il caso passare con una soluzione di Amuchina o prodotto simile.

Non usare solventi.

Lavare con un panno umido ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Lavatesta → Raccolta Plastica

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y093399

Codice EMDN: Y093399

Codice BD/RDM: 2540807



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902