

Nome ProdottoASTA A CAMPANA IMBOTTITA
(cod. 649)

REF	Taglia	Misure (cm)
649	M (6 fori)	15,7 x 2,4
	L (8 fori)	19,2 x 2,4

Confezione da min. 1 pezzo per misura

**Destinazione d'Uso**

Splint per immobilizzare e proteggere, in caso di fratture, articolazioni interfalangee in estensioni.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Struttura in alluminio e imbottitura di gommasciuma con spessore di 5 mm e cotone a contatto con la pelle.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Prodotto sanitario da applicare sotto controllo medico.

Radiotrasparente - Le aste consentono di effettuare radiografie senza rimuovere il tutore (60 kv 5 mas).



Latex Free



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Appoggiare le dita, chiudere con una leggera pressione e fasciare.

Controindicazioni e Avvertenze

Evitare l'immersione in liquidi, poiché il supporto in materiale traspirante assorbe e trattiene gli stessi.

Verificare che il supporto sia morbido, se invece risulta secco e screpolato (circostanza che può verificarsi dopo una lunga esposizione ai raggi solari) non è consigliato l'uso. Il prodotto non va applicato direttamente sulla pelle.

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

Non Lavabile.

Conservazione

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

Tipo di Confezione

Sacchetto in plastica contenente min. 1 pezzo per misura.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Asta a Campana → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030505

Codice EMDN: M030505

Codice BD/RDM: 2539836



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni,9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051/373838 Fax: +39 051/371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877