

**Nome Prodotto**PETTORALE PELVICO DI SICUREZZA  
(cod. 683P)

REF	Misura	Colore
683P	Unica	Blu, Nero (secondo disponibilità)

Lunghezza tiranti laterali: 180 cm  
Lunghezza tirante pelvico: 105 cm  
Vestibilità: fino a 170 cm**Destinazione d'Uso**

La cintura è indicata per pazienti costretti alla carrozzina o seduta per evitarne la caduta e lo scivolamento in avanti del busto e del bacino. Regolabile tramite le tre fibbie in plastica di cui sono muniti i tiranti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

MTP: vellutino 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione), interno 100% poliuretano base etere.

Gallone: 100% cotone.

Fibbia: tridente in plastica acetilica con resistenza fino a 100 kg.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Posizionare l'imbragatura sulla seduta della carrozzina o seduta facendo passare il gallone o sotto la seduta oppure tra la seduta e lo schienale.
2. Far sedere il paziente sulla carrozzina o seduta e regolare sul retro tramite la fibbia in plastica di cui sono muniti i tiranti.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

#### Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

#### Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

#### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Pettorale → Raccolta Indifferenziata

#### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

#### Altre Informazioni

Codice CND: Y122406

Codice EMDN: Y122406

Codice BD/RDM: 2518779



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902