

**PETTORALE CON DOPPIO TIRANTE PER  
CARROZZINA  
(cod. 684)****Nome Prodotto**PETTORALE CON DOPPIO TIRANTE PER  
CARROZZINA  
(cod. 684)

REF	Misura	Colore
684	Unica	Crema

Lunghezza Totale Cintura: 180 cm

Vestibilità: fino a 160 cm

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per pazienti costretti alla carrozzina per evitarne la caduta e lo scivolamento in avanti del bacino. Regolabile tramite la fibbia di cui sono muniti i tiranti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

MTP: vellutino 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione), interno 100% poliuretano base etere.  
Gallone: 100% cotone.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Far sedere il paziente sulla carrozzina e appoggiare la patta sul ventre del paziente
2. Portare il doppio tirante sul retro facendolo passare sulle spalle
3. Infilare nell'asola posteriore la cinghia di regolazione vita
4. Bloccare il tutto con la fibbia scorrevole a scatto

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**PETTORALE CON DOPPIO TIRANTE PER  
CARROZZINA  
(cod. 684)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Pettorale → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: Y122406

Codice EMDN: Y122406

Codice BD/RDM: 2521238



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:  
e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902