

**CINTURA DI CONTENIMENTO LETTO CON  
BUSTINO RIGIDO (DOPPIO MOVIMENTO)  
(cod. 686)****Nome Prodotto**CINTURA DI CONTENIMENTO LETTO CON  
BUSTINO RIGIDO (DOPPIO MOVIMENTO)  
(cod. 686)

REF	Misura	Colore
686	Unica	Crema

Circonferenza regolabile: da 85 a 130 cm

Lunghezza totale: 215 cm

**Destinazione d'Uso**

La cintura è indicata per pazienti costretti a letto ed incapaci di cooperare.

Il dispositivo impedisce le cadute accidentali dal letto, inoltre consente al personale che assiste di ruotare il paziente su entrambi i lati in totale sicurezza. Se la pancera viene fissata alla struttura del letto lasciando alcuni centimetri di "gioco" il paziente avrà la possibilità di assumere anche una posizione seduta.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Chiusura con 6 occhielli.

Bustino in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide ed interno 100% poliuretano base etere.

Busto rigido esterno e Gallone (tiranti): 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone



Necessari ma forniti a parte su richiesta: bottoni 690M + chiave 691M

**Istruzioni per l'Uso**

1. Fissare ai lati del letto i tiranti laterali con gli appositi bottoni di sicurezza (forniti a parte e a richiesta assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M) o con un legaccio.
2. Fissare con il velcro il bustino interno in vellutino sull'addome del paziente.
3. Chiudere il bustino rigido sovrapponendo la patta con gli anelli ovali all'altra.
4. Utilizzare gli occhielli per fissare il bustino (come al punto 1).  
(fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

**CINTURA DI CONTENIMENTO LETTO CON  
BUSTINO RIGIDO (DOPPIO MOVIMENTO)  
(cod. 686)**

**In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.**

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cintura → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2521248



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902