

CORSETTO WORKSPORT LOMBARE CLASSICO
(cod. 707)**Nome Prodotto**CORSETTO WORKSPORT LOMBARE
CLASSICO
(cod. 707)

REF	Taglie	Misure Circonferenza Vita (da cm a cm)
707	S	70/80
	M	80/95
	L	95/110
	XL	110/125
	XXL	115/135



Altezza anteriore 14 cm

Altezza posteriore 27 cm

Colore: Nero

Destinazione d'Uso

Per pazienti che devono mantenere la corretta posizione della schiena e anche per prevenire strappi durante uno sforzo fisico. È consigliato l'uso al bisogno.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

50% Poliammide, 20% Gomma, 15% Poliuretano e 15% Poliestere. Contiene Lattice.

Chiusura a strappo con due tiranti regolabili.

Istruzioni per l'Uso

Indossare in vita sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale.

1. Posizionare il corsetto attorno alla vita e chiuderla con il velcro all'altezza dell'ombelico;
2. Afferrare i tiranti elastici laterali e fissarli sul pannello di velcro esterno.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lavare il capo avendo cura di tenere il velcro chiuso come se fosse indossato.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Corsetto → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y060308

Codice EMDN: Y060308

Codice BD/RDM: 2518768



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902