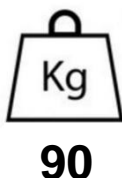


**CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA  
SILICONATA CON FORO CENTRALE  
(cod. 722)****Nome Prodotto**CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA  
SILICONATA CON FORO CENTRALE  
(cod. 722)

<b>REF</b>	Colore
722	Bluette
Misure disponibili ( $\pm$ 3/5%)	
<input type="checkbox"/> 40 x 40 cm Ø Foro cm. 12/13	<input type="checkbox"/> 45 x 45 cm Ø Foro cm. 14/15
<input type="checkbox"/> 43 x 43 cm Ø Foro cm. 13/14	<input type="checkbox"/> 48 x 48 cm Ø Foro cm. 14/15

Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il cuscino è indicato per aumentare il confort della seduta di chi soffre di infiammazione da decubito proteggendo le prominenze ossee evitando il problema del bottom out. Il dispositivo è utile alla prevenzione antidecubito per utenti a basso rischio. Il foro permette uno scarico centrale. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura: 100% Fiocco in Fibra Cava. Denier: 7 x 32 mm V.  
Fodera: 100% Cotone traspirante. Predisposto con due laccetti su un lato.

**Istruzioni per l'Uso**

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.  
Portata massima: 90 Kg.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Si raccomanda di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. Si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.  
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.  
Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA  
SILICONATA CON FORO CENTRALE  
(cod. 722)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in busta in TNT, in scatola di cartone o in sacchetto di polietilene.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Scatola → Raccolta Carta

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2518793



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902