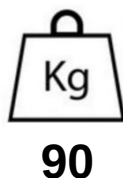


**CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA
SILICONATA SENZA FORO
(cod. 724)****'Nome Prodotto**

CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA
SILICONATA SENZA FORO
(cod. 724)

REF	Colore
724	Bluette
Misure disponibili ($\pm 3/5\%$)	
☐ 40 x 40 cm	☐ 45 x 45 cm
☐ 43 x 43 cm	☐ 48 x 48 cm

Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il cuscino è indicato per aumentare il confort della seduta di chi soffre di infiammazione da decubito proteggendo le prominenze ossee evitando il problema del bottom out. Il dispositivo è utile alla prevenzione antidecubito per utenti a basso rischio. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Imbottitura: 100% Fiocco in Fibra Cava. Denier: 7 x 32 mm V.

Fodera: 100% Cotone traspirante. Predisposto con due laccetti su un lato.

Istruzioni per l'Uso

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.

Portata massima: 90 Kg.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Si raccomanda di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. Si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare, ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA
SILICONATA SENZA FORO
(cod. 724)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in busta in TNT, in scatola di cartone o in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Scatola → Raccolta Carta

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2518791



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902