

Nome ProdottoCOLLARE CERVICALE RIGIDO
(cod. F0810)

REF	Taglia e Misure	Colore
F0810	S Altezza: 9 cm Lunghezza: 30/38 cm	Bianco
	M Altezza: 10 cm Lunghezza: 37/43 cm	
	L Altezza: 12 cm Lunghezza: 43/50 cm	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per distorsioni lievi, distorsioni medie, cervicalgie e cervicobrachialgie.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Il dispositivo è costituito da materiale "ipoallergico": cotone, poliammide, poliestere, polietilene, poliuretano e PVC. Non contiene lattice.

Istruzioni per l'Uso

Collare in polietilene di forma anatomica regolabile in altezza mediante sistema tipo velcro, con bordi imbottiti rivestiti di similpelle e chiusura posteriore con sistema tipo velcro.

Posizionare intorno al collo e fissare con il velcro.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno specialista qualificato.

Per una buona scelta della taglia, a complemento della misurazione, è necessaria una prova del prodotto per un adattamento corretto e una buona vestibilità.

Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso di esigenze di rimozione del prodotto consultare il personale sanitario qualificato.

Dispositivo Non Sterile.

Seguire le istruzioni di lavaggio.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di pulizia.

Pulire il collare con un panno umido. Non immergere o lavare in lavatrice.

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Il collare col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non incide sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Collare → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y060312

Codice EMDN: Y060312

Codice BD/RDM: 2553692



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902