

**CUFFIA "DINA" PER CHEMIO REFRIGERATA
TESSUTO ESTERNO IN COTONE
ED INTERNO IN ALENA
(cod. F0893)****Nome Prodotto**

CUFFIA "DINA" PER CHEMIO REFRIGERATA
TESSUTO ESTERNO IN COTONE ED INTERNO IN
ALENA
(cod. F0893)

| REF | Colore | Taglia |
|------------|--------|--------|
| F0893 | Bianco | Unica |



Include 2 elementi refrigeranti.

Destinazione d'Uso

La cuffia è indicata per pazienti sottoposti a chemioterapia per proteggere la pelle maggiormente suscettibile dagli agenti esterni come freddo e raggi solari e prevenire le patologie correlate.

L'azione refrigerante diminuisce inoltre la temperatura del cuoio capelluto.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Esterno: 100% Cotone.

Fodera Interna in "Alena": 53% Poliestere e 47% Poliuretano.

Idrorepellente e antibatterico. Formaldeide e Lattice assenti.

Refrigerante: Cuscinetto gel riutilizzabile- busta gel per la terapia di freddo e caldo. Il gel è destinato ad essere utilizzato per contatto di breve termine ovvero per una durata continua inferiore a 24 ore. (leggere le istruzioni corredate con il dispositivo)

Istruzioni per l'Uso

Indossare come un normale capo di abbigliamento (cuffia). Inserire le capsule refrigeranti nelle apposite tasche.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua calda massimo a 60°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.

**CUFFIA "DINA" PER CHEMIO REFRIGERATA
TESSUTO ESTERNO IN COTONE
ED INTERNO IN ALENA
(cod. F0893)**

Temperatura max 60°C

Candeggio non
possibileNon asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciate, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in busta in TNT.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Cuffia → Raccolta Indifferenziata

Refrigerante → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0207

Codice EMDN: T0207

Codice BD/RDM: 2546646

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902