

Nome Prodotto
PANTOFOLA COPRIGESSO
(cod. F0910)

REF	Misure
F0910	dalla 36 alla 48

Confezione da 1 pezzo

**Destinazione d'Uso**

La pantofola coprighesso è indicata per la protezione del gesso come appoggio antiscivolo del gesso quando l'appoggio dell'arto e la deambulazione sono consentiti dal medico curante.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Tomaia composta da:

vellutino 100% poliammide, tessuto 50 % poliestere, 50 % viscosa, 30% polipropilene, 30% poliestere e 40 % acrilico.

Sottopiede:

30% polipropilene, 30% poliestere e 40% acrilico.

Intersuola e suola: gomma nera naturale e tela juta.

Bordini: 100% tela cotone.

Occhielli: ferro/nichel

Stringhe: 100% poliestere.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.

Istruzioni per l'Uso

La numerazione corrisponde a quella delle scarpe normali, con calzata opportunamente maggiorata. Provare innanzitutto il proprio numero abituale e, se il volume non fosse sufficiente oppure risultasse eccessivo, passare al numero superiore o inferiore. La forma è simmetrica, quindi lo stesso copri gesso può essere utilizzato indifferentemente sul piede destro o sinistro. Indossare come una calzatura normale, allacciando la stringa nel modo più completo, e stretta, se il coprighesso deve fungere anche da appoggio antiscivolo.

Controindicazioni e Avvertenze

La calzatura coprighesso deve essere indossata solamente sopra a un gesso o fasciatura rigida analoga. Può essere usata per l'appoggio e/o la deambulazione con appoggio del gesso solo se consentito dal medico che ha realizzato il gesso e/o dal medico curante. Può essere indossata subito dopo l'applicazione del gesso perché traspirante. Anche in questo caso consultare il medico. Deve essere usata nelle condizioni di fornitura e non può essere modificata in alcun modo.

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

LAVARE CON ACQUA A 30°C E SAPONE NEUTRO, EVITANDO L'IMMERSIONE PROLUNGATA. LA TOMAIA È COMPOSTA DA TRE STRATI DI TESSUTO CHE ASSORBONO MOLTA ACQUA. FARE ASCIUGARE COMPLETAMENTE PRIMA DELL'USO. Durante la fase di asciugatura, il coprighesso non deve essere esposto ai raggi solari. Non appoggiare sui termosifoni ed in generale evitare la vicinanza prolungata alle fonti di calore.

Conservazione

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

Tipo di Confezione

Scatola in cartone contenente 1 pezzo.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Pantofola → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M03050299

Codice EMDN: M03050299

Codice BD/RDM: 2539863



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni,9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051/373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902