

**CUSCINO "ANATOMICO" IN LATTICE  
CON COPRICUSCINO  
(cod. F2103)****'Nome Prodotto**

CUSCINO "ANATOMICO" IN LATTICE  
CON COPRICUSCINO  
(cod. F2103)

<b>REF</b>	Colore
F2103	Bianco
Misure ( $\pm 3\%$ )	
Lunghezza cm. 67,5	
Larghezza cm. 43,5	
Altezza cm. 11,5	



Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il cuscino aiuta nella prevenzione di allergie ambientali in soggetti allergici. Migliora la ventilazione durante il riposo, mantenendo un comodo sostegno per i muscoli cervicali.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Cuscino: 100% Lattice Vegetale.

Copricuscino: 65% Poliestere e 35% Cotone.

Chiusura con zip.

**Istruzioni per l'Uso**

Posizionare sul letto e usare come un normale cuscino.

Posizionare il capo tra le 2 "onde" per aiutare una giusta postura dei muscoli cervicali.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio solo per la fodera. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene Lattice.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura del copricuscino dato in dotazione. Lavare in acqua tiepida massimo a 40°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ed asciugare lontano da fonti di calore. Stirare a bassa temperatura.



Temperatura max 40°C



Candeggiare possibile con  
prodotti contenenti  
cloro



Non asciugare in  
asciugatrice



Stirare fino a 110°C



Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**CUSCINO "ANATOMICO" IN LATTICE  
CON COPRICUSCINO  
(cod. F2103)**

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di polietilene e busta in TNT.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V080399

Codice EMDN: V080399

Codice BD/RDM: 2550563



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902