

Nome Prodotto

SOSPENSORIO "VINCIT" PER BORSA
SCROTALE
(cod. 011)

REF	Taglie	Semicirconferenza Borsa Scrotale (cm)
011	II	10/14
	III	11/16
	IV	12/17
	V	13/18
	VI	14/19
	VII	15/21
	Tutte	Nastro Vita (cm) 100 + 25 con fibbia
Tutte	Nastro Sottocoscia (cm) 78	



Le misure sono indicative; si raccomanda di chiedere all'operatore sanitario maggiori informazioni

Colore: Bianco

Destinazione d'Uso

Sospensorio utilizzato per sostenere il peso dello scroto sulle pareti inguinali evitando l'allungamento dei funicoli testicolari. Utilizzato nei decorsi post-operatori e nello sport.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

86% Cotone, 12% Elastan e 2% Poliammide. Non contiene Lattice.
Coppa areata in cotone traforato. Chiusura con fibbia.

Istruzioni per l'Uso

1. Indossare il sospensorio in modo che la borsa in rete contenga lo scroto.
2. Regolare in vita con la fibbia scorrevole.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Sospensorio → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030499

Codice EMDN: M030499

Codice BD/RDM: 2523375

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902