

**SOSPENSORIO SPORTIVO CONTENITIVO
"PRIMAVERA" SENZA FORO
(cod. 019)****Nome Prodotto**

SOSPENSORIO SPORTIVO CONTENITIVO
"PRIMAVERA" SENZA FORO
(cod. 019)

REF	Taglie	Circonferenza Fianchi (cm)	Sacca Scrotale (cm)
019	II	70/82	15 x 12
	III	76/90	16 x 14
	IV	82/98	
	V	85/103	18 x 16
	VI	90/108	
	VII	94/110	18 x 18
	VIII	98/120	
REF	Taglie	Fascia Sottocoscia (cm)	
019	II	42	
	III	44	
	IV	46	
	V	49	
	VI	52	
	VII	54	
	VIII	56	



La misura della sacca scrotale è indicativa rispetto alle taglie sopra riportate.

Colore: Bianco

Destinazione d'Uso

Sospensorio destinato per sostenere il peso dello scroto sulle pareti inguinali evitando l'allungamento dei funicoli testicolari. Utilizzato nei decorsi post-operatori e nello sport.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

76% Cotone e 24% Elastan. Non contiene Lattice.

Coppa triangolare in cotone.

Istruzioni per l'Uso

Indossare il sospensorio come un normale slip in modo che la borsa in cotone contenga lo scroto.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**SOSPENSORIO SPORTIVO CONTENITIVO
"PRIMAVERA" SENZA FORO
(cod. 019)**

Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Sospensorio → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030499

Codice EMDN: M030499

Codice BD/RDM: 2523373



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902