

**CAVIGLIERA REGOLABILE CON TIRANTI**  
**(cod. 071)****Nome Prodotto**CAVIGLIERA REGOLABILE CON TIRANTI  
(cod. 071)

<b>REF</b>	Taglia
071	Unica

Colore: Nero

**Destinazione d'Uso**

La cavigliera è indicata nei decorsi post-operatori per operazioni al tendine e spine calcaneari. in caso di fratture metatarsali. Inoltre può essere usata come rinforzo e sostegno della caviglia in caso di affaticamento della muscolatura. Indicata anche per gli sportivi.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

60% Poliammide, 21% Elastan, 10% Poliestere e 9% Viscosa.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Infilare la cavigliera in modo che i tiranti si trovino sotto la pianta del piede
2. Passare un tirante sul dorso del piede e avvolgerlo alla caviglia
3. Ripetere l'operazione con l'altro tirante
4. Chiudere con il velcro.

La pressione non deve risultare eccessiva onde evitare difficoltà nella circolazione del sangue.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Non utilizzare su ferite.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non strizzare



Non lavare a secco

#### Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

#### Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

#### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Cavigliera → Raccolta Indifferenziata

#### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

#### Altre Informazioni

Codice CND: M030499

Codice EMDN: M030499

Codice BD/RDM: 2528941



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902