

**PELOTTA INGUINALE PIATTA FODERATA IN
POLIURETANO (DX & SX)
(cod. 082)****Nome Prodotto**

PELOTTA INGUINALE PIATTA FODERATA IN
POLIURETANO (DX & SX)
(cod. 082)

REF	Misura
082	Unica

Colore: Beige

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per contenere piccole ernie inguinali.

Sono da utilizzare con i codici:

034 (Cinto 111 DX), 035 (Cinto 111 SX), 036 (Cinto 111 Doppio), 046 (Cinto 111 F DX), 047 (Cinto 111 F SX) e 048 (Cinto 111 F Doppio).

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Involucro esterno: 86% Poliestere e 14% Elastan, con piastra in velcro in Polipropilene.

Sigillato il tutto con termo saldatura.

Pelotta: 100% Poliuretano.

Istruzioni per l'Uso

Applicare ai cinti con codice 034 (Cinto 111 DX), 035 (Cinto 111 SX), 036 (Cinto 111 Doppio), 046 (Cinto 111 F DX), 047 (Cinto 111 F SX) e 048 (Cinto 111 F Doppio) con la parte tonda rivolta verso l'ernia tramite il velcro.

Non mettere la parte interna (con il velcro) a contatto con la pelle nuda.

Controindicazioni e Avvertenze

Non Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua fredda con detersivo neutro, sciacquare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**PELOTTA INGUINALE PIATTA FODERATA IN
POLIURETANO (DX & SX)
(cod. 082)**

Tipo di Confezione

Confezionato in busta di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Pelotta → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M04010202

Codice EMDN: M04010202

Codice BD/RDM: 2528944



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902