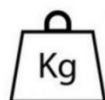
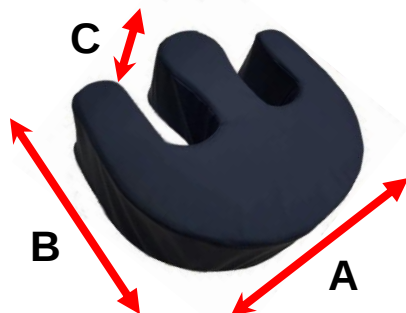


CUSCINO ROTAZIONE PAZIENTE "EMME"
(cod. 101)**Nome Prodotto**CUSCINO ROTAZIONE PAZIENTE "EMME"
(cod. 101)

REF	Misure ($\pm 3\%$)	Colore Fodera
101	(A) Base: ~ 49 / 50 cm (B) Altezza: ~ 42 / 43 cm (C) Larghezza: ~ 12 cm	Blu

Confezione da 1 pezzo.

**110****Destinazione d'Uso**

Dispositivo che permette all'assistente di ruotare la persona con estrema facilità e, soprattutto, di limitare il rischio di attriti e dolori vari. Permette inoltre di accompagnare le gambe con un semplice movimento del bacino e può alleviare il disagio e la pressione su ginocchia, fianchi e vita, favorire la circolazione del corpo, alleviare il gonfiore, il dolore e l'affaticamento e rilassarsi meglio.

Adatto a pazienti che sono sottoposti ad anestesia generale, disfunzione del movimento fisico, chirurgia spinale e altri pazienti che si girano.

Il rivestimento sfoderabile in tessuto "Alena" resistente, realizzato in poliuretano impermeabile, antistatico, antibatterico, antiacaro, traspirante e disinfettabile. La superficie impermeabile può prevenire la bagnatura per garantire la salute fisica degli anziani, fornisce un supporto confortevole.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Anima: 100% poliuretano elastico e indeformabile con densità pari a $25 \text{ Kg/m}^3 (\pm 5\%)$. Colore giallo. Non contiene lattice.

Altre caratteristiche:

Resistenza a compressione	3,3 kpa
Resistenza affondamento	R25 (newton) 127 – R40 (newton) 185 – R65 (newton) 292
Resistenza a trazione/Carico di rottura	120 kpa
Perdita di portanza/Fatica dinamica	28%
Deformazione permanente 50%	4,9%
Resa elastica	40%
Tolleranze generali	($\pm 15\%$).

Fodera: 53% poliestere e 47% poliuretano. Impermeabile, antistatico, antibatterico, antiacaro, traspirante. Autoestinguente di classe 1. Chiusura con zip.

Istruzioni per l'Uso

Posizionare le gambe del paziente sulle fessure del cuscino, l'assistente deve mettere una mano sulla vita o sulla schiena del paziente e tenere una mano sul cuscino. Quando il paziente è completamente fissato, si può iniziare a girarlo o a spostarlo usando meno forza.

Seguire eventuali indicazioni da parte del personale sanitario.

CUSCINO ROTAZIONE PAZIENTE "EMME"
(cod. 101)**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Peso massimo dell'utente: 110 kg



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera.

Se necessario disinfettare la fodera con disinfettanti specifici.

Lavare in acqua calda massimo a 60°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.

Se necessario disinfettare l'anima interna con soluzione di disinfettante specifico nebulizzato o imbevuto in un panno.



Temperatura max 60°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

L'anima interna col tempo può assumere un colore che vira al giallo scuro dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080302

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2539035



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902