

**RADDRIZZASPALLE LOLA  
(CORRETTORE DELLE SCAPOLE ALATE)  
(cod. 123)****Nome Prodotto**

RADDRIZZASPALLE LOLA  
(CORRETTORE DELLE SCAPOLE  
ALATE)  
(cod. 123)

| REF | Taglie | Misure Torace<br>(da cm a cm) |
|-----|--------|-------------------------------|
| 123 | XS     | 55                            |
|     | S      | 65                            |
|     | M      | 75                            |
|     | L      | 90                            |
|     | XL     | 100                           |



Colori disponibili: Ecrù.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo indicato per pazienti che devono correggere l'atteggiamento curvo cifotico dovuto a postura errata.

La parte posteriore realizzata in tessuto puntinato ortopedico con stecche lo rende indicato per la correzione delle scapole alate.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

88% Cotone, 8% Viscosa, 4% Elastam.

Chiusura con velcro.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Infilare le braccia nelle apposite aperture
2. Incrociare sulla schiena le patte in tessuto puntinato in modo che si trovino sulle scapole
3. Portare i tiranti sul davanti all'altezza dello stomaco e regolarne la tensione con il velcro

Si consiglia di indossare il raddrizzaspalle sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**RADDRIZZASPALLE LOLA  
(CORRETTORE DELLE SCAPOLE ALATE)  
(cod. 123)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Raddrizzaspalle → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030501

Codice EMDN: M030501

Codice BD/RDM: 2528928



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902