

**COPRIMONCONE TUBOLARE IN COTONE**  
(cod. 219C)**'Nome Prodotto**COPRIMONCONE TUBOLARE IN COTONE  
(cod. 219C)

<b>REF</b>	Colore
219C	Bianco
Misure	
Lunghezza cm. 40 e Semicirconferenza ~ cm. 27	
Lunghezza cm. 50 e Semicirconferenza ~ cm. 32	
Lunghezza cm. 60 e Semicirconferenza ~ cm. 36	



Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il coprimonccone protegge il moncone dell'arto amputato ed evita lo sfregamento con eventuali protesi.

I dispositivi proteggono quindi la parte dell'arto amputato dalle possibili frizioni provocate dalla protesi oltre che a mantenere un contatto non diretto tra la protesi stessa e la parte dell'arto amputato impedendo così possibili infezioni o abrasioni.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

80% Cotone biologico NE 20/1

20% Supporto in nylon 6 70/2

**Istruzioni per l'Uso**

Indossare come una normale calza / calzino.

Eseguire eventuali indicazioni dal personale sanitario competente.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di polietilene.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Coprimonccone → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: Y090618

Codice EMDN: Y090618

Codice BD/RDM: 2539907



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902