

**'Nome Prodotto**

CUSCINO PAOLINO ANTIDECUBITO  
"AIRMOVE"  
(cod. 234)

<b>REF</b>	Colore
234	Verde Chiaro
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 40	
Larghezza cm. 40	
Altezza cm. 5	



Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il cuscino è indicato nella prevenzione e cura delle piaghe di primo livello, per disabili in carrozzina e per il miglior comfort in tutte le attività che richiedono lunghi tempi di seduta. Non è consigliato l'uso per pazienti lungodegenti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura: 100% PVC schiumato in cilindri.

Fodera Interna: 100% Tessuto Evolon® (PES / PA).

Fodera Esterna: 53% Poliestere e 47% Poliuretano. Chiusura a zip.

**Istruzioni per l'Uso**

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Non è consigliato l'uso per pazienti lungodegenti.

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera esterna.

Lavare in acqua calda massimo a 90°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, centrifugare delicatamente, ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 90°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in busta in TNT.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2553684



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902