

**RADDRIZZASPALLE MILLY
(CON TIRANTE ADDOMINALE E RICHIAMO
DORSALE DELLA POSTURA)
(cod. 287)****Nome Prodotto**

RADDRIZZASPALLE MILLY (CON TIRANTE
ADDOMINALE E RICHIAMO DORSALE DELLA
POSTURA)
(cod. 287)

REF	Taglie	Misure (da cm a cm)
287	S	65 / 80
	M	80 / 95
	L	95 / 110
	XL	110 / 125



Colore disponibile: Ecrù.

Destinazione d'Uso

Dispositivo indicato per pazienti che sono affetti da cifosi giovanili oltre che nelle patologie minori del rachide dorsale dovute a posture coatte errate (impiegati, studenti).

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

48% Cotone, 41% Poliammide e 11% Gomma. Contiene lattice.
Chiusura con velcro per regolarne la tensione.

Istruzioni per l'Uso

1. Appoggiare la patta sulla schiena
2. Chiudere il tirante in cintura sul davanti all'altezza dello stomaco regolando la tensione con il velcro
3. Far passare i tiranti sotto le ascelle incrociarli sulla schiena e chiuderli sull'addome con il velcro

Si consiglia di indossare il raddrizzaspalle sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**RADDRIZZASALLE MILLY
(CON TIRANTE ADDOMINALE E RICHIAMO
DORSALE DELLA POSTURA)
(cod. 287)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Raddrizzasalle → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030501

Codice EMDN: M030501

Codice BD/RDM: 2528929



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902