

'Nome ProdottoCUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL DI
SILICONE
(cod. 299B)

REF	Colore
299B	Blu
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 40, Larghezza cm. 40 Altezza cm. 2	
Peso: ~ 2,6 Kg	

Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Il cuscino è indicato per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito minimo o ai primi stadi. Inoltre è indicato per lungodegenti e per disabili costretti in carrozzina. Particolarmente funzionale anche per sedute prolungate in ufficio o per lunghi viaggi in auto. Migliora la seduta scaricando quelle zone sacrali che risultano dolorose o fastidiose. Ideale per persone sovrappeso.

Traspirante. Cuscino particolarmente fresco ed arieggiato grazie allo specifico sistema di fori delle lastre di imbottitura. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Lastra "Plastogel": è costituita da una parte polimerica, (insieme di stirolo butadiene e un plastificante - olio paraffinico). La parte polimerica è un prodotto altamente puro con caratteristiche fisico meccaniche eccellenti. Il plastificante è un prodotto incolore insapore e inodore che soddisfa la F.U.I. IX° Edizione e U.S.P. XVIII Ed. Colorazione con prodotti biocompatibili e atossici.

Altre caratteristiche:

<u>Plastogel</u>	
Densità apparente	900,7 kg/m ³
Conducibilità termica	0,1130 W/m*K
Allungamento a rottura	> 600%
Sollecitazione a rottura	85 KPa

L'articolo non è classificato pericoloso secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 e s.m.i.

Fodera Esterna: 100% velluto di cotone a coste.

Antiscivolo: 91% PVC e 9% Poliestere; rivestimento interno al 100% poliestere. Chiusura con velcro.

Fodera Interna (rivestimento lastra Plastogel): 53% poliestere e 47% poliuretano. Impermeabile, antistatico, antibatterico, antiacaro, traspirante. Autoestinguento di classe 1. Chiusura a zip.**Istruzioni per l'Uso**

Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina. La parte antiscivolo deve essere rivolta verso il basso a contatto con la seduta.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Fodera Esterna (velluto blu):

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Fodera Interna:

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Per la lastra:

Lavare passando un panno morbido imbevuto di acqua e, se il caso, disinfettare con soluzione di Amuchina o di prodotti simili. Non mettere in lavatrice o in ammollo. Non usare solventi.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Conservare il cuscino in posizione orizzontale.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Scatola → Raccolta Carta / Manico della scatola → Raccolta Plastica / Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V08030102

Codice EMDN: V08030102

Codice BD/RDM: 2518785



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902