

Nome ProdottoBORSA PER L'ACQUA CALDA
(cod. 324)

REF	Capacità (L)	Colore
324	2	Rossa e Blu

Confezione da 1 pezzo

**Destinazione d'Uso**

Indicata per la terapia antalgica e termoterapia oltre che essere indicata per alleviare dolori del corpo umano. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% gomma mono e bi lamellata. Capacità 2 litri.
Tappo di chiusura ermetica a vite in plastica ABS.

Istruzioni per l'Uso

Utilizzare la borsa, riempita di acqua calda, sulla parte da trattare. Usare esclusivamente acqua potabile. Chiudere bene la borsa con il tappo in dotazione avendo cura di far fuoriuscire l'aria in eccesso dall'interno. Verificare la corretta chiusura controllando eventuali fuoriuscite d'acqua. Posizionare la borsa sulla parte del corpo scelta utilizzando un panno morbido tra la pelle e la borsa.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.
Riempire esclusivamente con acqua ad una temperatura massima di +60°C.
Porre particolare attenzione alle variazioni di calore della borsa durante l'applicazione su persone con una scarsa sensibilità al calore o con circolazione sanguigna carente.
Non mettere la borsa a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

Nessuna.

Conservazione

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Non utilizzare la borsa se risulta danneggiata.

Prima di utilizzare il dispositivo, la prima volta risciacquare l'interno della borsa con acqua tiepida e detergente neutro non aggressivo.

Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente prima di avvitare il tappo e riporlo.

In caso di inutilizzo prolungato, prima di riavvitare il tappo, lasciare all'interno un certo quantitativo di aria per evitare l'adesione delle pareti della borsa.



Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Borsa → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0499

Codice EMDN: V0499

Codice BD/RDM: 2540808



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni,9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051/373838 Fax: +39 051/371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877