

**Nome Prodotto**BORSA PER IL GHIACCIO IN COTONE GOMMATO  
(cod. 325)

REF	Misure (cm)	Colore
325	~ 28	Beige

Confezione da 1 pezzo

**Destinazione d'Uso**

Indicata per applicare la terapia del freddo in maniera naturale per ridurre la flogosi in caso di traumi o contusioni. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

100% cotone gommato spalmato nella parte interna della borsa.  
Anello di fissaggio, tappo di chiusura ermetica a vite e filettatura interna in plastica ABS.

**Istruzioni per l'Uso**

Utilizzare la borsa, riempita di ghiaccio, sulla parte da trattare.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.  
Non mettere la borsa a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

Nessuna.

**Conservazione**

Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.



Non utilizzare la borsa se risulta danneggiata.

Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente prima di avvitarlo il tappo e riporlo.

In caso di inutilizzo prolungato, prima di riavvitare il tappo, lasciare all'interno un certo quantitativo di aria per evitare l'adesione delle pareti della borsa.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in scatola di cartone.

#### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Borsa → Raccolta Indifferenziata

#### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

#### Altre Informazioni

Codice CND: M9001

Codice EMDN: M9001

Codice BD/RDM: 2540809



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni,9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051/373838 Fax: +39 051/371877 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877