

COTTON "SONIA"
MUTANDA CONTENITIVA DONNA
(cod. 427)**Nome Prodotto**COTTON "SONIA"
MUTANDA CONTENITIVA DONNA
(cod. 427)

REF	Taglie	Misure Circonferenza Vita (da cm a cm)
427	II	70
	III	75
	IV	80
	V	85
	VI	90
	VII	95
	VIII	100



Colore: Nudo

Destinazione d'Uso

Indicati nei decorsi post-operatori in genere. Indicata inoltre nei pazienti con ernia inguinale semplice o bilaterale. Per alcune esigenze è consigliabile utilizzare l'articolo pelotta (cod.070) fornite a parte.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

80% Cotone e 20% Elastam.

Mutanda con doppio rinforzo nella parte addominale.

Fornita di pattina regolabile con gancetti.

Fascia poliestensiva in cintura.

Tasche per eventuale inserimento delle pelotte.

Istruzioni per l'Uso

Indossare come un normale slip. posizionando le pelotte (fornite a parte) nelle apposite tasche interne.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

COTTON "SONIA"
MUTANDA CONTENITIVA DONNA
(cod. 427)

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Mutanda → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030402010101

Codice EMDN: M030402010101

Codice BD/RDM: 2518774



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902