

**Nome Prodotto**  
DIVARICATORE CON TIRANTI  
(cod. 428)

REF	Misure (cm)	Colore
428	Piccolo: ~ 35 x 16/37 Altezza: ~ 17	Divaricatore: Azzurro Tiranti: Nero o Blu
	Grande: ~ 43 x 20/41 Altezza: ~ 17	



Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo indicato nel periodo immediatamente dopo l'intervento chirurgico di artroprotesi o endoprotesi indicato per i pazienti costretti a letto per mantenere le gambe in posizione divaricata.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Anima: 100% poliuretano elastico e indeformabile con densità pari a 30 Kg/m<sup>3</sup> (± 5%)

Tirante: 100% poliuretano espanso base etere e vellutino in poliammide.

**Istruzioni per l'Uso**

Posizionare il cuneo fra le cosce fissandolo con gli appositi tiranti.

Se possibile utilizzare sopra ad un capo di abbigliamento per evitare un diretto contatto con la pelle.

Seguire eventuali indicazioni da parte del personale sanitario.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

Non lavabile



Non lavare



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

L'anima interna col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di polietilene.

#### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Divaricatore → Raccolta Indifferenziata

#### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

#### Altre Informazioni

Codice CND: M030503

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2523369



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902