

**Nome Prodotto**

SUPPORTO PELVICO MORBIDO

(per cod. 612)

(cod. 612PE)

REF	Misura	Colore
612PE	Unica	Crema

**Destinazione d'Uso**

Il supporto è indicato per pazienti costretti alla carrozzina o comoda per evitarne la caduta accidentale.

Il prodotto si adatta **ESCLUSIVAMENTE** al nostro articolo Cod.612 "cintura antiscivolamento regolabile per carrozzina".

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura interna in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide ed interno 100% poliuretano base etere.

Gallone (tiranti): 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone



Necessari ma forniti a parte su richiesta: bottoni 690M+chiave 691M

**Istruzioni per l'Uso**

La cintura Cod.612, deve essere già posizionata ed assicurata alla carrozzina o comoda.

Eeguire il montaggio nel seguente modo:

1. Fissare i galloni della pancera della cintura Cod.612 allo schienale della carrozzina assieme al "supporto pelvico"
2. Fare passare il supporto pelvico Cod.612PE tra lo schienale e la seduta.
3. Fare sedere il paziente e assicurare con il bottone (fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M) il supporto pelvico assieme alla pancera.
4. Regolare la tensione del supporto pelvico tramite gli occhielli (dietro lo schienale).

**In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.**

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Supporto → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2523260



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902