

**CINTURA ANTISCIVOLAMENTO REGOLABILE  
PER CARROZZINA H.15 CM  
(cod. 612)****Nome Prodotto**

CINTURA ANTISCIVOLAMENTO REGOLABILE  
PER CARROZZINA H.15 CM  
(cod. 612)

REF	Misura	Colore
612	Unica	Crema

Altezza Patta Interna: ~ 15 cm

Lunghezza Totale: 130 cm

Circonferenza patta regolabile da 70 a 120 cm

**Destinazione d'Uso**

La cintura è indicata per pazienti costretti alla carrozzina o comoda impedendo scivolamenti e cadute accidentali.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura interna in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide ed interno 100% poliuretano base etere.

Gallone (tiranti): 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone



Necessari ma forniti a parte su richiesta:

bottoni 690M + chiave 691M

**Istruzioni per l'Uso**

1. Fissare la pancera allo schienale della carrozzina o seduta sovrapponendo i galloni (tiranti) e assicurandoli con il bottone (cod. 690M).
2. Far sedere il paziente.
3. Chiudere la pancera sovrapponendo le patte intorno alla vita del paziente bloccando il tutto con l'apposito bottone magnetico di sicurezza (fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

**In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.**

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

**CINTURA ANTISCIVOLAMENTO REGOLABILE  
PER CARROZZINA H.15 CM  
(cod. 612)**

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cintura → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2523255



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902