

**CINTURA CON MANIGLIE PER TRASFERIMENTO
AMMALATI
(cod. 623)****Nome Prodotto**CINTURA CON MANIGLIE PER
TRASFERIMENTO AMMALATI
(cod. 623)

REF	Misure (cm)	Colore
623	M (70 / 100)	Blu
	L (80 / 110)	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato per consentire al terapeuta o all'operatore sanitario di gestire il paziente in maniera dipendente e sicura. Inoltre facilita anche la mobilizzazione e il trasferimento possibili da eseguire con meno sforzo e più sicurezza.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Esterno: 70% PVC e 30% Poliestere

Interno: 100% Poliestere. Antiscivolo

Fibbie in plastica.

Istruzioni per l'Uso

Utilizzando le apposite maniglie l'operatore può spostare il paziente dal letto, dalla carrozzella, dalla barella dalla sedia o water. Le 6 maniglie consentono a due operatori di spostare pazienti particolarmente pesanti.

Indossare come una cintura in vita.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Le maniglie collegate alla cintura possono sostenere circa 130 kg. Tuttavia, è importante sapere che le cinture di mobilità servono per guidare e accompagnare il paziente, non per sollevarlo. Se un paziente bariatrico deve essere mobilizzato, è importante tenere conto di come la mobilizzazione avverrebbe senza ausili tecnici, e se sono necessarie due persone, è consigliabile che siano necessarie anche due persone con ausili tecnici.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**CINTURA CON MANIGLIE PER TRASFERIMENTO
AMMALATI
(cod. 623)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cintura → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0805038002

Codice EMDN: V0805038002

Codice BD/RDM: 2486677



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902