


### Nome Prodotto

REHA BALL  
(cod. 637-1/2/3)

REF	Tipologia	Colori
637-1	Soft	Verde
637-2	Medium	Blu
637-3	Strong	Rossa

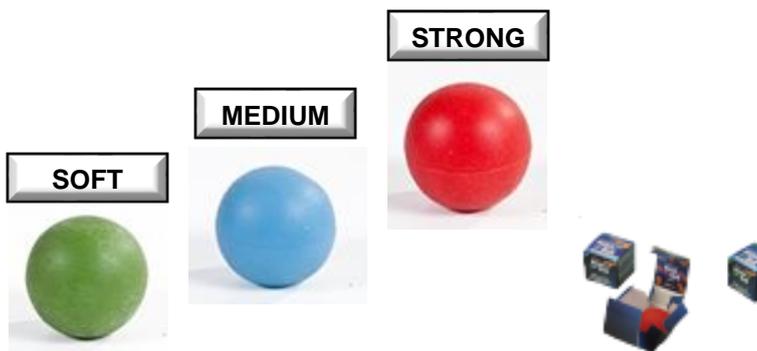

### Destinazione d'Uso

Per pazienti che hanno bisogno di esercizi di riabilitazione alla mano, alle dita e all'avambraccio. Usata regolarmente migliora la forza, la destrezza e la mobilità della mano. Disponibile in tre versioni:

- SOFT: indicata per esercizi leggeri della mano e come anti-stress
- MEDIUM: indicata per esercizi di moderata intensità, di miglioramento dei muscoli della mano
- STRONG: perfetta anche per gli sportivi per rinforzare la muscolatura di mano e avambraccio

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

### Descrizione e Materiali

Gel polimero a base di stirene – etilene / butilene–stirene / vasellina liquida.

Questi prodotti sono composti formulati a partire da caucciù, vasellina liquida e tela di poliammide, materiali tutti essenzialmente atossici. I materiali sono non irritanti.

### Istruzioni per l'Uso

Usare come indicato dal fisioterapista.

Può essere utilizzata anche riscaldata, immergendola in acqua calda per 3-4 minuti prima dell'uso, o raffreddata in frigorifero. Utilizzare come indicato nella confezione e nelle immagini sottostanti.



1 Stretta con la mano:  
migliora la forza della presa dei muscoli della mano e del braccio.



2 Stretta con il palmo:  
Migliora la forza della presa dei muscoli della mano e delle dita, allena l'intera catena flessoria del braccio e dell'avambraccio.



3 Stretta con le dita:  
Incrementa la forza della presa tra il pollice e le altre dita.



4 Tocco di precisione:  
migliora il tocco leggero, la precisione e la propriocezione. L'esercizio può essere fatto ad occhi chiusi.



5 Stretta con il pollice:  
migliora la mobilità del pollice e la muscolatura del polso.



7 Flessione delle dita:  
esercita i muscoli flessori superficiali e profondi delle dita. L'esercizio migliora anche il tocco leggero delle dita.



8 Rotazione:  
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



9 Pressione con le dita:  
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



10 Pressione con il palmo:  
rinforza i muscoli del polso e dell'avambraccio, migliora la precisione del tocco leggero.



11 Rotazione di 2 sfere:  
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



Adduzione delle dita:  
rinforza i muscoli della mano e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



Stretta interna al palmo:  
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.

### Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio e pulizia. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Non scaldare mai nel microonde – per riscaldarla immergere in acqua calda. Non raffreddare nel congelatore – per raffreddare utilizzare il frigorifero. Può macchiare le superfici con cui entra in contatto. Riporre sempre la pallina nella sua scatola in dotazione.



Dispositivo non sterile

### Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare con acqua e sapone neutro. Asciugare bene e cospargere di talco, prima di riporre la sfera nella confezione.

### Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

### Tipo di Confezione

Confezionato in scatola.

### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Pallina → Raccolta Indifferenziata

### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

### Altre Informazioni

Codice CND: Y0503

Codice EMDN: Y0503

Codice BD/RDM (verde): 2553696

Codice BD/RDM (blu): 2553697

Codice BD/RDM (rossa): 2553698



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902