

Nome Prodotto


REHA BALL ESPOSITORE DA 12 PEZZI
(cod. 637ESP)

REF	Tipologia	Colori
637-1	Soft	Verde
637-2	Medium	Blu
637-3	Strong	Rossa



Contiene:

- 4 Palline Soft
- 4 Palline Medium
- 4 Palline Strong

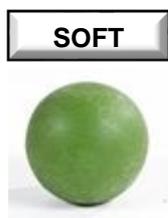

Destinazione d'Uso

Per pazienti che hanno bisogno di esercizi di riabilitazione alla mano, alle dita e all'avambraccio. Usata regolarmente migliora la forza, la destrezza e la mobilità della mano. Disponibile in tre versioni:

- SOFT: indicata per esercizi leggeri della mano e come anti-stress
- MEDIUM: indicata per esercizi di moderata intensità, di miglioramento dei muscoli della mano
- STRONG: perfetta anche per gli sportivi per rinforzare la muscolatura di mano e avambraccio

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Gel polimero a base di stirene – etilene / butilene–stirene / vasellina liquida.

Questi prodotti sono composti formulati a partire da caucciù, vasellina liquida e tela di poliammide, materiali tutti essenzialmente atossici. I materiali sono non irritanti.

Istruzioni per l'Uso

Usare come indicato dal fisioterapista.

Può essere utilizzata anche riscaldata, immergendola in acqua calda per 3-4 minuti prima dell'uso, o raffreddata in frigorifero. Utilizzare come indicato nella confezione e nelle immagini sottostanti.



1 Stretta con la mano:
migliora la forza della presa dei muscoli della mano e del braccio.



7 Flessione delle dita:
esercita i muscoli flessori superficiali e profondi delle dita.
L'esercizio migliora anche il tocco leggero delle dita.



2 Stretta con il palmo:
Migliora la forza della presa dei muscoli della mano e delle dita, allena l'intera catena flessoria del braccio e dell'avambraccio.



8 Rotazione:
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.

REHA BALL ESPOSITORE DA 12 PEZZI
(cod. 637ESP)

3 Stretta con le dita:
Incrementa la forza della presa tra il pollice e le altre dita.



9 Pressione con le dita:
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



4 Tocco di precisione:
migliora il tocco leggero, la precisione e la propriocezione.
L'esercizio può essere fatto ad occhi chiusi.



10 Pressione con il palmo:
rinforza i muscoli del polso e dell'avambraccio, migliora la precisione del tocco leggero.



5 Stretta con il pollice:
migliora la mobilità del pollice e la muscolatura del polso.



11 Rotazione di 2 sfere:
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



6 Adduzione delle dita:
rinforza i muscoli della mano e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.



12 Stretta interna al palmo:
rinforza i muscoli delle dita e del polso, migliora la precisione del tocco leggero.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio e pulizia. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Non scaldare mai nel microonde – per riscaldarla immergere in acqua calda. Non raffreddare nel congelatore – per raffreddare utilizzare il frigorifero. Può macchiare le superfici con cui entra in contatto. Riporre sempre la pallina nella sua scatola in dotazione.



Dispositivo non sterile

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare con acqua e sapone neutro. Asciugare bene e cospargere di talco, prima di riporre la sfera nella confezione.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in scatola.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatole → Raccolta Carta

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Pallina → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y0503
Codice EMDN: Y0503
Codice BD/RDM (verde): 2553696
Codice BD/RDM (blu): 2553697
Codice BD/RDM (rossa): 2553698
Codice BD/RDM (espositore): 2553699



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902