

**PARACOLPI SPONDE LETTO  
RITARDANTE DI FIAMMA (CONF. 2 PZ.)  
(cod. 645)****Nome Prodotto**PARACOLPI SPONDE LETTO RITARDANTE  
DI FIAMMA (CONF. 2 PZ.)  
(cod. 645)

REF	Misura (cm)	Colore
645	200 x 50 (± 3%)	Blu, Nero (secondo disponibilità)



Confezione da 2 pezzi.

**Destinazione d'Uso**

Il paracolpi è indicato per tutelare il paziente da urti accidentali contro superfici rigide come ad esempio letti.  
Si consiglia l'utilizzo a personale adeguatamente addestrato.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Interno in MTP: vellutino 100% poliammide o poliestere (come da etichetta composizione), interno 100% poliuretano base etere. Il tessuto è stato dichiarato ritardante di fiamma secondo test della casa produttrice del tessuto.

Fodera: 53% Poliestere e 47% Poliuretano. Impermeabile, antistatico, antibatterico, antiacaro, parzialmente traspirante.

Classificazione di Reazione al Fuoco: CLASSE I.

Rapporto di prova N. 1266.0UN0180/07 alla reazione al fuoco di Classe I

Metodo prova:

- UNI 8457-UNI 8457/A1
- UNI 9174-UNI 9174/A1

**Istruzioni per l'Uso**

Fissare il paracolpi contro la parete o oggetto in modo da tutelare il paziente contro gli urti accidentali.

Ad esempio, per un corretto utilizzo del paracolpi devono essere utilizzate le fasce con velcro intorno alle sponde del letto.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**PARACOLPI SPONDE LETTO  
RITARDANTE DI FIAMMA (CONF. 2 PZ.)  
(cod. 645)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Paracolpi → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V08068099

Codice EMDN: V08068099

Codice BD/RDM: 2521241



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:  
e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902