

Nome Prodotto
SPLINT PER DITA IN PLASTICA
(cod. 646)

REF	Misura
646	1
	2
	3
	4
	5
	5,5
	6
	7



Confezione da min. 1 pezzo per misura

Destinazione d'Uso

Gli splints per dita in plastica sono usati per fratture della falange distale e permettono il movimento delle falangi senza restrizione. Sono radiotrasparenti e compatibili con TAC e RNM.

Indicati per:

- Lesioni del tendine estensore
- Fratture delle ultime falangi
- Distorsioni dell'interfalangea distale
- Contusioni ungueali
- Trattamento post-operatorio degli interventi sui tendini estensori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Polipropilene con fori di aerazione.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Prodotto sanitario da applicare sotto controllo medico.

Radiotrasparente.

Latex
Free

Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Individuare la misura adeguata, inserire il dito e fissare con bende o cerotto.

Nel caso il dito sia troppo fragile e delicato, usare un ditale di una taglia più grande e imbottirlo all'interno per dare un maggiore comfort alla parte lesionata.

Controindicazioni e Avvertenze

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri. Sciacquare bene.

Conservazione



Al fine di evitare malfunzionamenti il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto, al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto dal suo involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato.

Tipo di Confezione

Sacchetto in plastica contenente min. 1 pezzo per misura.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Splint → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030505

Codice EMDN: M030505

Codice BD/RDM: 2539832



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni,9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051/373838 Fax: +39 051/371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 371877