

**SCOVOLINO TRACHEOTOMIA DIAMETRO 10 MM
(cod. 652)****'Nome Prodotto**

SCOVOLINO TRACHEOTOMIA

DIAMETRO 10 MM

(cod. 652)

REF	Colore
652	Bianco
Misure	
Lunghezza Totale cm 20,5	
Lunghezza parte in Nylon cm 8	
Diametro mm 10	

Confezione da 5 pezzi.

**Destinazione d'Uso**

Lo scovolino è indicato per la pulizia della cannula tracheale. Quindi è un dispositivo medico destinato ad essere introdotto nelle cannule per tracheotomizzati allo scopo di pulire la cannula e la contro-cannula da muco e materiali organici che normalmente si depositano e che potrebbero causare l'ostruzione del dispositivo cannula.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Supporto: Acciaio Inox AISI 304

Spazzola: Filo di Nylon (PA6.6)

Istruzioni per l'Uso

Infilare lo scovolino all'interno della cannula muovendolo sia in senso rotatorio che in avanti e indietro fino alla completa rimozione di muco o residui organici presenti. Se il caso, usare soluzioni disinfettanti apposite.

Per il corretto lavaggio della cannula seguire le indicazioni del personale medico e sanitario.

Lavarsi sempre le mani prima e dopo la procedura di pulizia.

Eseguire eventuali altre indicazioni dal personale sanitario competente.

Controindicazioni e Avvertenze

Da non utilizzare prima di aver effettuato un lavaggio per 15 minuti in acqua distillata.

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non
sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida con detersivo e sciacquare bene, oppure, fare uso di disinfettanti appositi.

Non lavare con solventi organici o acidi. Asciugare lontano da fonti di calore.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (filamenti di nylon mancanti, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Scovolino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: R010580

Codice EMDN: R01058099

Codice BD/RDM: 2539894



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902