

**FERULA POST-OPERATORIA CON FODERA  
(cod. 668)****Nome Prodotto**FERULA POST-OPERATORIA CON FODERA  
(cod. 668)

REF	Misure (± 3%)	Colore
668	Lunghezza: 73 cm Profondità: 35 cm Base di Appoggio: 53 cm	Bianco

Confezione da 1 pezzo.  
Abbinato alla Fodera (cod. 669)**Destinazione d'Uso**

Dispositivo indicato in ortopedia e traumatologia per il contenimento e l'immobilizzazione dell'arto inferiore dopo la frattura o dopo un intervento chirurgico.

La ferula è ambidestra ma si adatta perfettamente alla gamba da trattare accogliendo adeguatamente la sua anatomia. Foderabile con fodera che garantisce la massima traspirabilità, evitando la sudorazione e proteggendo la pelle da eventuali irritazioni.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

100% Poliuretano espanso stampato a freddo.

**Istruzioni per l'Uso**

Adagiare la gamba all'interno della ferula in modo adeguato con il piede in posizione verticale.

Seguire eventuali indicazioni da parte del personale sanitario.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Se il caso, disinfettare con soluzione di Amuchina o prodotti simili.

Non mettere in lavatrice o in ammollo.

Non usare solventi.

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

La ferula col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di polietilene.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Ferula → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030506

Codice EMDN: M030506

Codice BD/RDM: 2553694



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902