

**FODERA DI RICAMBIO PER FERULA
POST-OPERATORIA COD.668
(cod. 669)**

Nome Prodotto

FODERA DI RICAMBIO PER FERULA
POST-OPERATORIA COD.668
(cod. 669)

REF	Taglie
669	Unica



Colore: secondo disponibilità

Destinazione d'Uso

Fodera per Ferula Post-Operatoria (cod. 668).

Il rivestimento in cotone 100% garantisce la massima traspirabilità, evitando la sudorazione e proteggendo la pelle da eventuali irritazioni, inoltre consente una maggiore pulizia della ferula.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

100% Cotone.

Chiusura con laccetti.

Istruzioni per l'Uso

Rivestire la ferula ed allacciare la fodera con i laccetti.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 40°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Stirare a bassa temperatura.



Temperatura max 40°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Stirare max 110°C



Non lavare a secco

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**FODERA DI RICAMBIO PER FERULA
POST-OPERATORIA COD.668
(cod. 669)**

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Fodera → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030506

Codice EMDN: M030506

Codice BD/RDM: 2553695



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902