

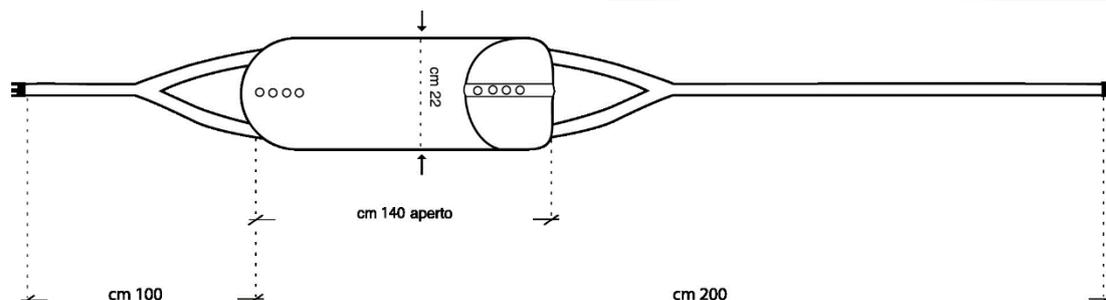
**CINTURA CONTENIMENTO LETTO REGOLABILE
SEMPLICE
(cod. 687)****Nome Prodotto**CINTURA CONTENIMENTO LETTO
REGOLABILE SEMPLICE
(cod. 687)

REF	Misura	Colore
687	Unica	Crema

Circonferenza regolabile: da 85 a 120 cm

Lunghezza totale: 300 cm

Altezza patta 20-22 cm

**Destinazione d'Uso**

La cintura è indicata per pazienti costretti a letto ed incapaci di cooperare.

Questa cintura consente di ruotare il paziente su di un lato per necessità.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Imbottitura interna in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide ed interno 100% poliuretano base etere.

Gallone: 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Fibbia: tridente in plastica acetilica con resistenza fino a 100 kg.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone



Necessari ma forniti a parte:

Istruzioni per l'Uso

1. Avvolgere il tirante lungo, attorno alla base del letto prima di chiuderlo con la fibbia lateralmente.
2. Chiudere il bustino rigido attorno all'addome del paziente sovrapponendo la patta con i due occhielli all'altra.
3. Bloccare il tutto con l'apposito bottone magnetico di sicurezza.
(fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

**CINTURA CONTENIMENTO LETTO REGOLABILE
SEMPLICE
(cod. 687)****Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cintura → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2521247



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902