

**CINGHIA FERMABRACCIA / CAVIGLIE
RINFORZATA
(cod. 688RINF)****Nome Prodotto**CINGHIA FERMABRACCIA / CAVIGLIE
RINFORZATA
(cod. 688RINF)

REF	Misura	Colore
688RINF	Unica	Crema

Circonferenza regolabile: da cm. 15 a cm. 30

Lunghezza totale: 135 cm

Lunghezza a gallone per sponda: da 50 a 75 cm

Confezione da 2 pezzi

**Destinazione d'Uso**

La cinghia è indicata per limitare il movimento delle gambe di pazienti agitati, in modo da evitare danni alla persona o ad altri. Solo l'operatore provvisto della chiave magnetica (cod. 691M) può liberare il paziente.

Utilizzabile esclusivamente da personale sanitario specializzato.

Se usata per le caviglie è consigliabile l'utilizzo del nostro articolo con Cod. 689C.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Gallone: 100% Cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone.

Lunghezza regolabile con occhielli in lega.

Cintura fissaggio letto opzionale Cod. 689C.



Necessari ma forniti a parte: bottoni 690M + chiave 691M

Istruzioni per l'Uso

1. Fissare con gli appositi bottoni l'estremità al montante del letto
2. Avvolgere la fascia morbida attorno al polso/caviglia fissandola con il velcro
3. Far passare il tirante con occhielli nella fibbia e assicurare con un bottone (precedentemente posizionato) (fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

**CINGHIA FERMABRACCIA / CAVIGLIE
RINFORZATA
(cod. 688RINF)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica. Confezione da 2 pezzi.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cinghia → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0804

Codice EMDN: V0804

Codice BD/RDM: 2523146



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902