


**CINTURA FISSAGGIO LETTO  
(OPZIONALE PER COD.688 E 688RINF)  
(cod. 689C)****Nome Prodotto**

CINTURA FISSAGGIO LETTO  
(OPZIONALE PER COD.688 E 688RINF)  
(cod. 689C)

REF	Misura	Colore
689C	Unica	Crema

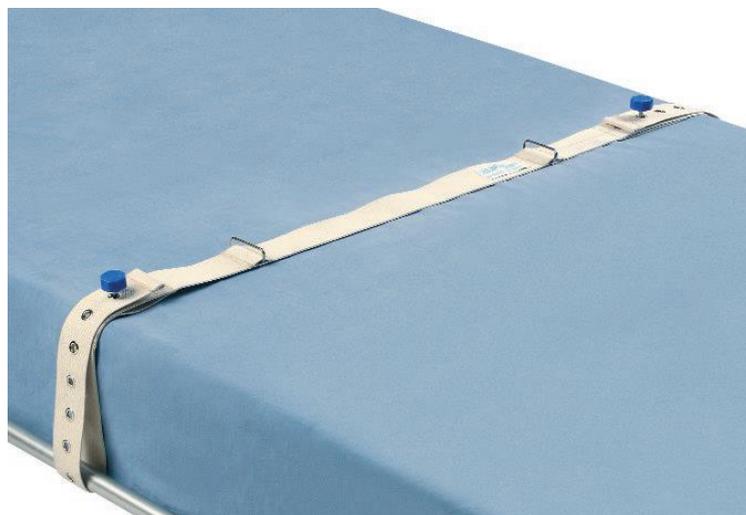

Lunghezza totale: 195 cm

Utilizzabile su letto singolo o su letto da 1  
piazza e mezza

**Destinazione d'Uso**

La cintura è da utilizzare solo ed esclusivamente con i nostri articoli con Cod. 688 e 688RINF.

Solo l'operatore provvisto della chiave magnetica (cod. 691M) può liberare il paziente.

Utilizzabile esclusivamente da personale sanitario specializzato.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Gallone: 100% Cotone.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone.

Lunghezza regolabile con occhielli in lega.



Necessari ma forniti a parte:

**Istruzioni per l'Uso**

Fissare la fascia alla struttura del letto e chiuderla con i bottoni di sicurezza (Cod. 690M).

(fornito a parte assieme alla chiave di sicurezza Cod. 690M & 691M)

Fare passare i fermapolsi/caviglie all'interno dei passanti in ferro per regolare l'ampiezza di movimento che si vuole lasciare al paziente.

**In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.**

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

**CINTURA FISSAGGIO LETTO  
(OPZIONALE PER COD.688 E 688RINF)  
(cod. 689C)**

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cintura → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030599

Codice EMDN: M030599

Codice BD/RDM: 2523147



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902