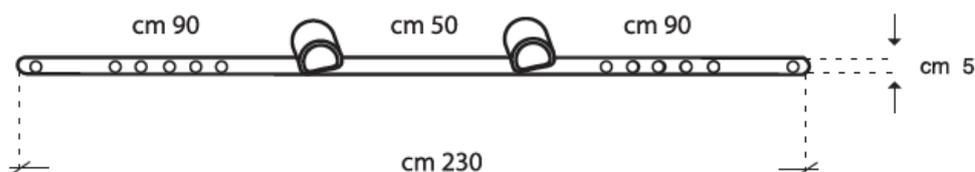


**CINGHIA FERMAGAMBE DIVARICATRICE
(cod. 689)****Nome Prodotto**CINGHIA FERMAGAMBE DIVARICATRICE
(cod. 689)

REF	Misura	Colore
689	Unica	Crema

Circonferenza regolabile: da cm. 15 a cm. 26

Lunghezza totale: 230 cm

**Destinazione d'Uso**

La cinghia è indicata per limitare il movimento delle gambe di pazienti agitati, in modo da evitare danni alla persona o ad altri. La posizione obbligata non permette alla muscolatura di lavorare a piena potenza.

Solo l'operatore provvisto della chiave magnetica (cod. 691M) può liberare il paziente.

Utilizzabile esclusivamente da personale sanitario specializzato.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Gallone: 100% Cotone.

Nastro Uncino: 100% Poliammide.

Occhielli: lega in Nickel/Ottone.

Lunghezza regolabile con occhielli in lega.



Necessari ma forniti a parte:

Istruzioni per l'Uso

1. Avvolgere la fascia morbida attorno alla caviglia fissandola con il velcro
2. Far passare il tirante con occhielli nella fibbia passante
3. Ripetere il procedimento con l'altra caviglia
4. Fissare i galloni alle estremità del letto con gli appositi bottoni magnetici di sicurezza (forniti a parte assieme alla chiave di sicurezza cod. 690M & 691M).

In caso di estrema urgenza disporre sempre di un cutter, forbici, o altro oggetto tagliente per poter tagliare le cinture di contenzione e liberare il paziente.

Il dispositivo va indossato sopra agli indumenti o biancheria intima.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Per l'uso del prodotto e delle sue applicazioni è raccomandata la prescrizione medica.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Cinghia → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0804

Codice EMDN: V0804

Codice BD/RDM: 2523161



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902