

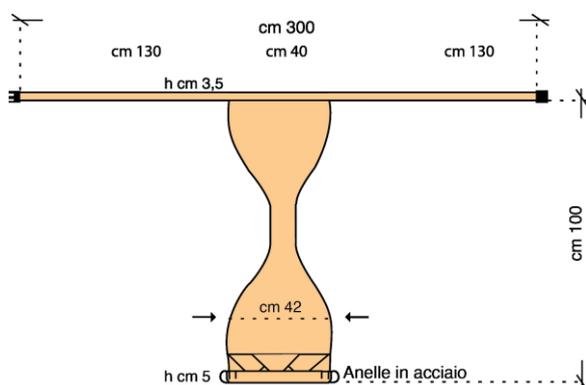
**IMBRAGATURA CON MUTANDA  
DI SICUREZZA ANATOMICA  
(cod. 701)****Nome Prodotto**IMBRAGATURA CON MUTANDA DI  
SICUREZZA ANATOMICA  
(cod. 701)

REF	Misura	Colore
701	Unica	Blu, Crema (secondo disponibilità)

Lunghezza: 300 cm

Vestibilità: fino a 120 cm

Altezza Tiranti: 5 e 3,5 cm

**Destinazione d'Uso**

L'imbragatura è indicata per pazienti costretti alla carrozzina per evitarne la caduta e lo scivolamento in avanti mantenendo la postura eretta. Regolabile tramite la fibbia in plastica di cui è munito il tirante.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Imbottitura interna in MTP: vellutino esterno in 100% poliammide ed interno 100% poliuretano base etere.

Tiranti: 100% cotone.

Esterno: 100% cotone.

Fibbia: tridente in plastica acetilica con resistenza fino a 100 kg.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Posizionare l'imbragatura sulla seduta della carrozzina con la patta con i tiranti appoggiata allo schienale della stessa.
2. Far sedere il paziente sulla carrozzina e portare la patta con i passanti ad anello di plastica sullo stomaco.
3. Fare passare i galloni con le fibbie in plastica all'interno dei passanti metallici ad anello, quindi agganciarli dietro allo schienale.

Il dispositivo va indossato sopra gli indumenti.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

**IMBRAGATURA CON MUTANDA  
DI SICUREZZA ANATOMICA  
(cod. 701)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Imbragatura → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: Y122406

Codice EMDN: Y122406

Codice BD/RDM: 2523210



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902